



ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN

D1denis

www.cerec-vdds.de

www.kern-dental.de

Einstellungen VDDS

- D1denis öffnen
- Einstellungen - Anbindungen
- Hier einen ungenutzten Eintrag heraussuchen (z. B. „Anbindung 5“)
- In das Feld „Name“ „CEREC-VDDS“ eintragen
- Den Button „Einrichten“ drücken
- Die Anbindungsart „VDDSmedia“ doppelklicken und folgende Werte setzen:
 - Typ: Standard
 - Pfad d. Infodatei: C:\D1\Temp (der Pfad muss existieren und beschreibbar sein!)
 - Röntgenprogramm aufrufen: anhaken
 - Röntgenprogramm konfigurieren: anhaken
- Den Button „Übernehmen“ drücken
- In der Auswahl der Applikationen „KERN_CEREC-VDDS“ auswählen

Patientenübergabe starten

- D1denis öffnen
- Patienten - Patientendaten - Patienten auswählen
- Behandlung - Karteiblatt
- In der rechten Spalte auf das Zahnrad mit der Bezeichnung „CEREC-VDDS“ klicken