



ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN


PraxisArchiv

www.cerec-vdds.de


www.kern-dental.de

Einstellungen PraxisArchiv

- PraxisArchiv öffnen
- Menüpunkt Datei anklicken
- Unterpunkt Datenquellen konfigurieren o. starten öffnen

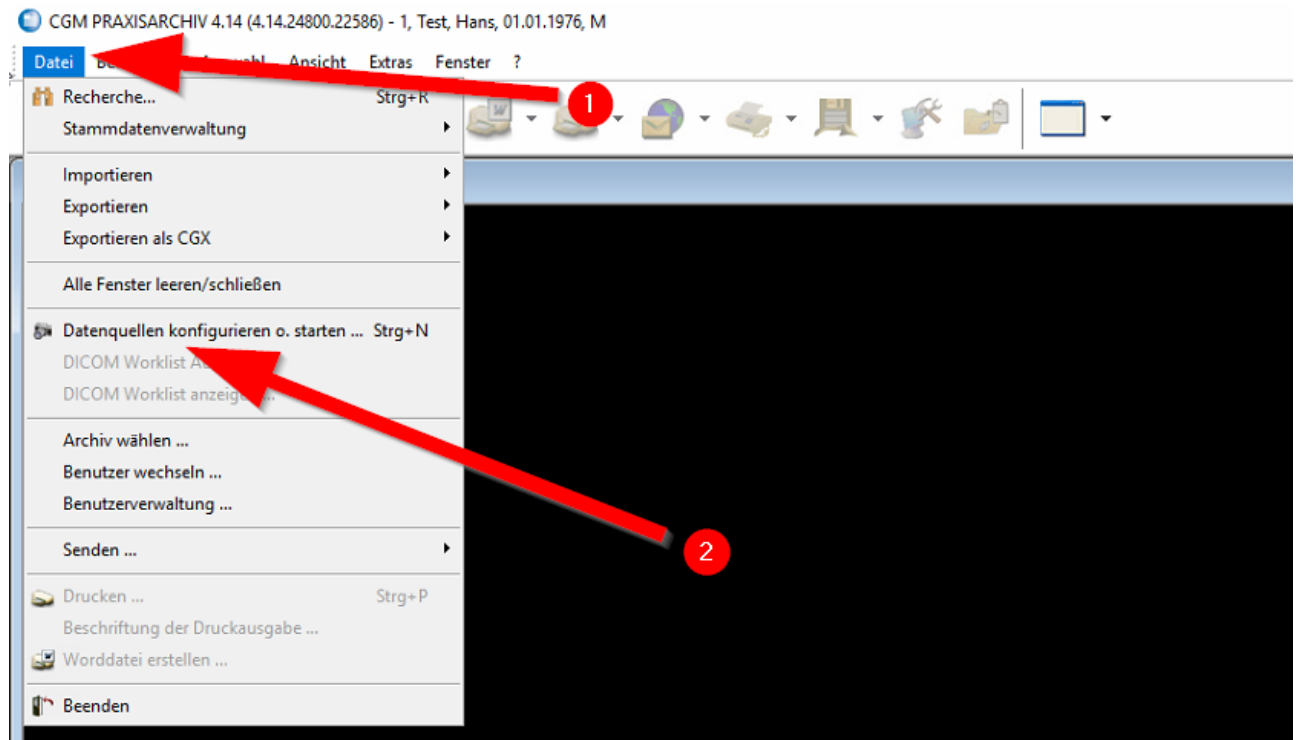

- Menüpunkt Bearbeiten anklicken
- Unterpunkt Neu anklicken
- Eintrag VDDS-media auswählen

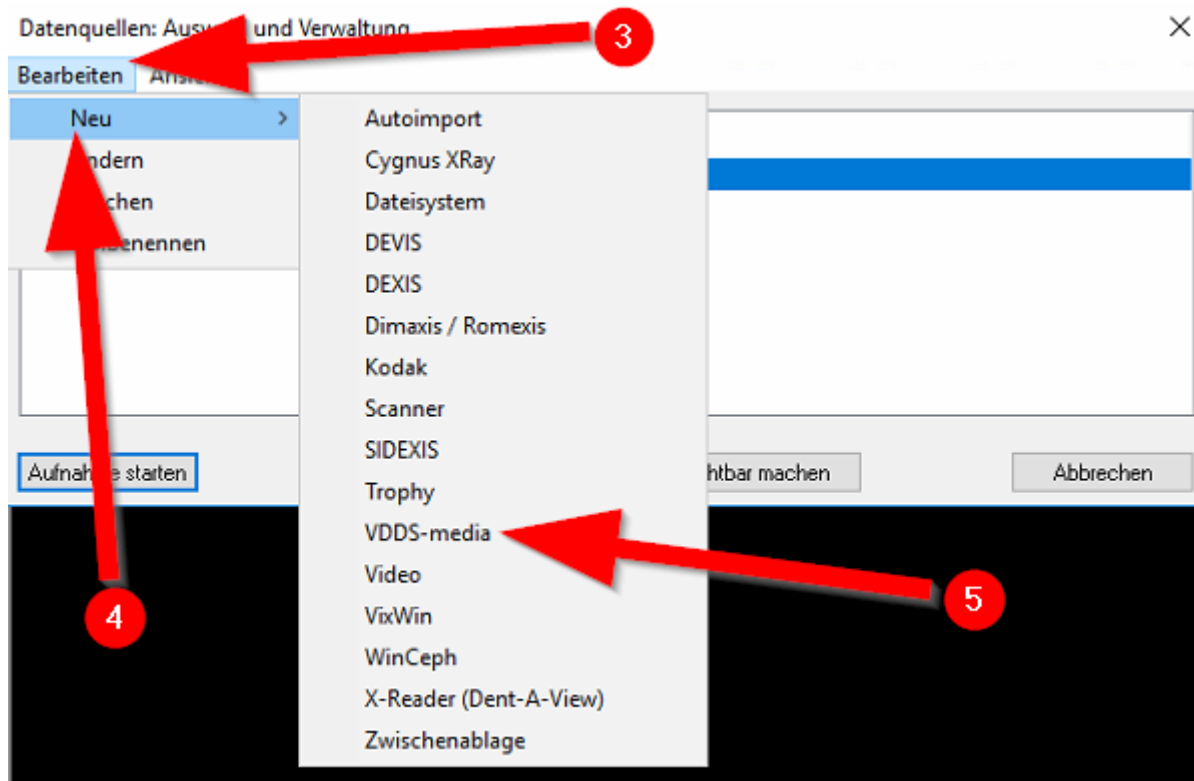


Patientenübergabe starten

- Z1 oder Z1.PRO öffnen
- Patienten suchen und auswählen
- Button Archiv anklicken



- Es öffnet sich das PraxisArchiv
- Menüpunkt Datei anklicken und den Unterpunkt Datenquellen konfigurieren o. starten öffnen (alternativ kann das Kamerasymbol in der Symbolleiste angeklickt werden)

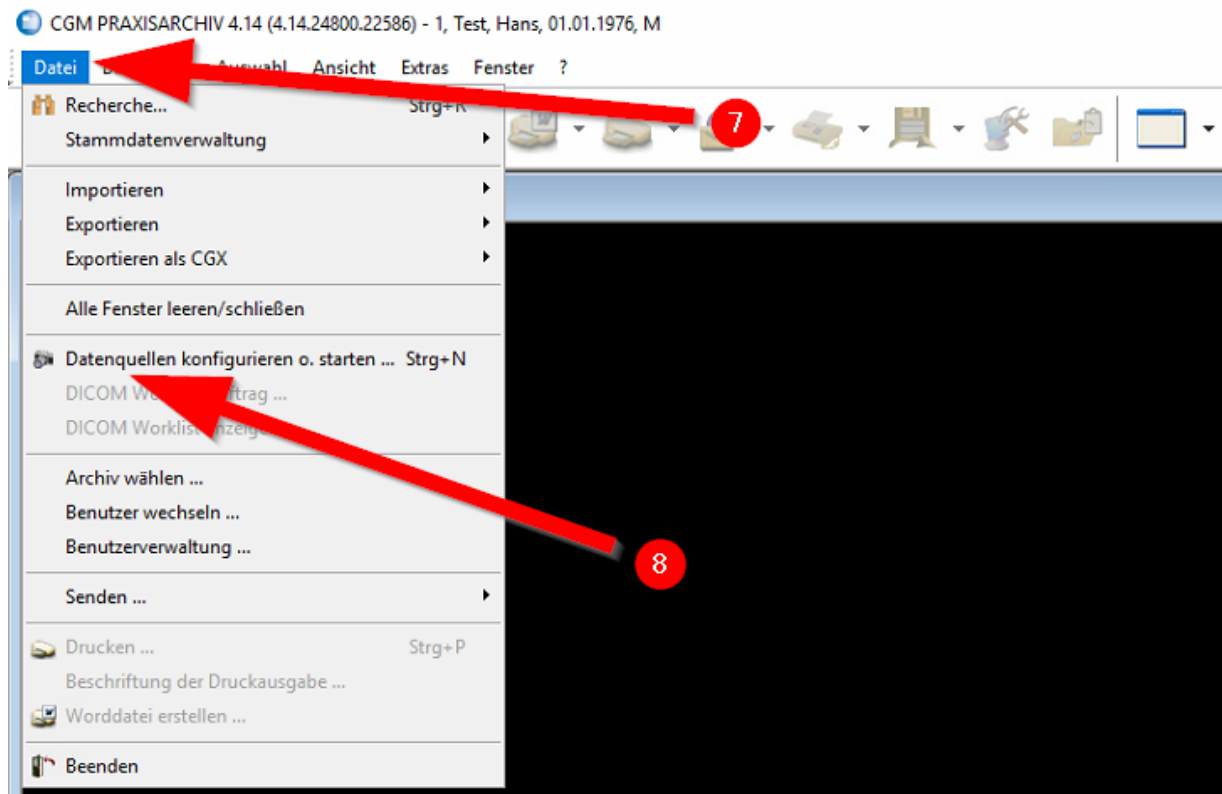

- Eintrag VDDS-Media auswählen
- Button Aufnahme starten anklicken

