



ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN


teemer

www.cerec-vdds.de

www.kern-dental.de

VDDS-Einstellungen

- Beachten Sie, dass Sie die VDDS-Konfiguration in teemer nicht selbst vornehmen können, da hierzu Anmeldedaten benötigt werden.
- Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von teemer und lassen in der teemer Konfiguration ein neues VDDS-Gerät entsprechend den Screenshots für den Computer, auf dem Sie die CEREC-VDDS Software installiert haben, hinzufügen.

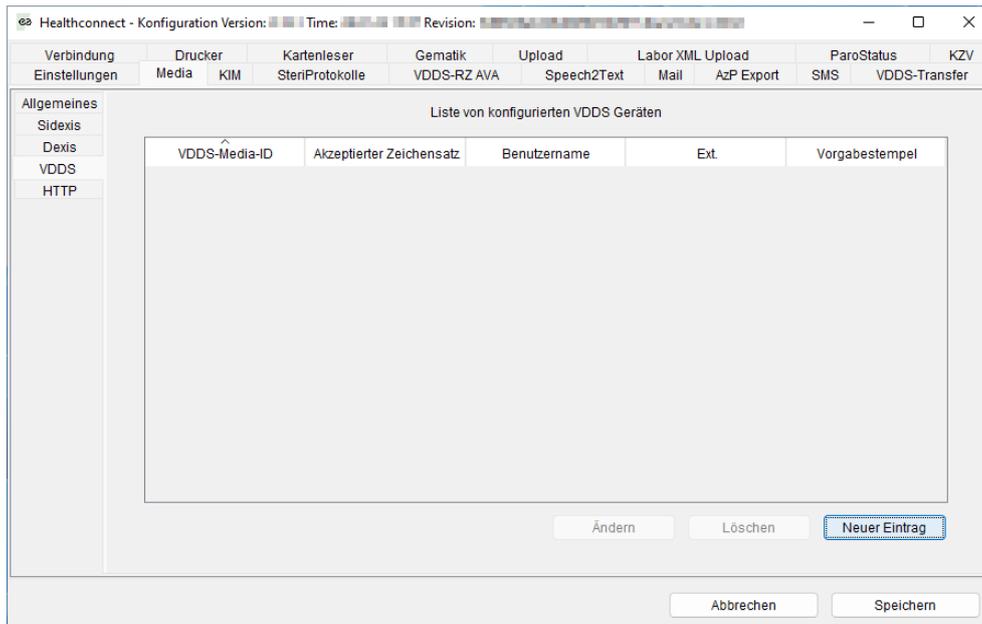

Healthconnect - Konfiguration Version: [] Time: [] Revision: []

Verbindung Einstellungen Drucker Media KIM Kartenleser SteriProtokolle Gematik VDDS-RZ AVA Upload Speech2Text Labor XML Upload Mail AzP Export ParoStatus SMS VDDS-Transfer KZV


Allgemeines
Sldexis
Dexis
VDDS
HTTP

Liste von konfigurierten VDDS Geräten

VDDS-Media-ID	Akzeptierter Zeichensatz	Benutzername	Ext.	Vorgabestempel

Ändern Löschen **Neuer Eintrag**

Abbrechen Speichern

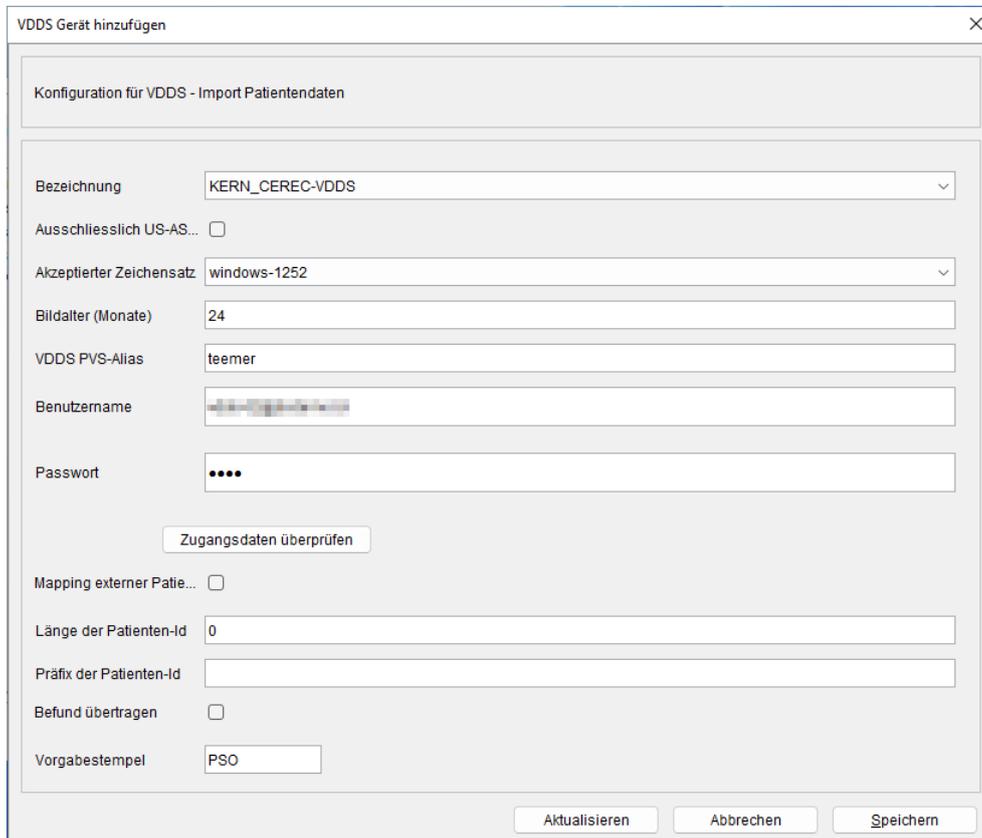

VDDS Gerät hinzufügen

Konfiguration für VDDS - Import Patientendaten

Bezeichnung: KERN_CEREC-VDDS

Ausschliesslich US-AS...

Akzeptierter Zeichensatz: windows-1252

Bildalter (Monate): 24

VDDS PVS-Alias: teemer

Benutzername: []

Passwort: []

Zugangsdaten überprüfen

Mapping externer Patie...

Länge der Patienten-Id: 0

Präfix der Patienten-Id: []

Befund übertragen

Vorgabestempel: PSO

Aktualisieren Abbrechen Speichern

Patientenübergabe starten

- 1. Patienten öffnen - Button Media-Anzeige anklicken

The screenshot shows the patient record for Martin Meiser. The interface includes a header with the patient's name and photo, a navigation sidebar on the right, and a main content area with various data fields. A red arrow labeled '1' points to the 'Media-Anzeige' button in the sidebar menu.

- 2. Den lokalen Computer auswählen, auf dem die CEREC-VDDS Software installiert ist

The screenshot shows the same patient record interface, but with a 'Media-Anzeige' dialog box open. The dialog box contains a list of software options, with 'Cerec' selected. A red arrow labeled '2' points to the 'Cerec' option. A 'Schließen' button is visible at the bottom right of the dialog.

- 3. Patientenübergabe bestätigen

 Pat: Meiser, Martin

Export von Patient initiiert



Meiser, Martin
Geboren am 12.12.1956

E-Mail

Anamnese **Nicht vorhanden**
EWE **Nicht vorhanden**
AVA
ePA **keine** 

Persönliche Daten

Nachname Meiser

VORNAME CEREC-VDDS 2.6

Geburtsdatum 12.12.1956 66

Geburtsort

Gebührenbefreit bis

Titel

Hauptadresse

Adresszusatz

Straße Lübeckerstr 12

PLZ 22045

Ort Hamburg

Land Deutschland

E-Mail

Telefon

Mobil

Fax

3 

Der Patient 'Martin Meiser' wurde erfolgreich in die CEREC-DB eingetragen.

OK